

Anleitung zur

Stuhlprobengewinnung

AET0002, Version 003
gültig ab 16.08.2018

Die folgenden Hinweise helfen Ihnen bei der richtigen Entnahme und dem Postversand Ihrer Stuhlprobe. Nur so ist es uns im Labor möglich, exakte und unverfälschte Ergebnisse zu liefern.

1. Sind Ihre Test-Materialien vollständig?

Bitte überprüfen Sie zunächst, ob Ihre Test-Materialien vollständig sind:

- 1 Probengefäß inkl. Etikett in Versandgefäß
- 1 Stuhlfänger

2. Test-Vorbereitung

Flachspül-Toilette: „Deo-Mittel“ entfernen, nachspülen, Stuhl nicht mit Urin vermengen

Tiefspül-Toilette: beiliegenden „Stuhlfänger“ (Patientenhilfe für die Entnahme der Stuhlprobe) benutzen

3. Test-Durchführung

1. Benutzen Sie den Entnahmelöffel aus dem Probengefäß, um Proben an mindestens **5-6 verschiedenen Stellen** des Stuhls zu entnehmen. Achten Sie dabei darauf, dass Sie vom Anfang, von der Mitte sowie vom Ende des Stuhlgangs die Proben nehmen.
2. Füllen Sie diese in das Probengefäß **bis zur markierten Füllhöhe** (½ Röhrchen).
3. Verschließen Sie das Gefäß gut.
4. Beschriften Sie das Gefäß mit Namen und Probendatum.
5. Stecken Sie dieses in das Versandgefäß.
6. Legen Sie dieses mit dem ausgefüllten Anforderungsformular (Patientenname, -adresse, Geburtsdatum) in die Versandbox/ Versandtasche.



Der Versand sollte von Montag bis Donnerstag, **nicht zum Wochenende oder vor Feiertagen** erfolgen.

Probe ggf. im Kühlschrank aufbewahren, jedoch nicht einfrieren!

Vielen Dank für Ihre Mithilfe!
Ihr GANZIMMUN-Team